



RU САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Откройте упаковку и достаньте подгузник.
- Разверните и расправьте подгузник.
- Пропустите переднюю часть подгузника между ног впитывающим слоем к телу.
- Расправьте переднюю часть подгузника на животе.
- Расправьте заднюю часть и боковые стороны подгузника.
- Придерживая одной рукой переднюю часть подгузника, другой рукой наложите сверху и закрепите застёжки на передней части подгузника.
- Проконтролируйте, чтобы подгузник плотно прилегал к телу, но при этом не стеснял движений.



RU ПРИМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЁЖА

- Откройте упаковку, достаньте подгузник. Разверните и расправьте его.
- Поверните больного на бок.
- Приложите подгузник впитывающим слоем к телу.
- Переверните больного на спину на подгузник, чтобы задняя часть подгузника осталась под ягодицами.
- Переднюю часть подгузника пропустите между ног больного.
- Расправьте переднюю часть подгузника на животе больного, свободные боковые края подверните под ягодицы.
- Расправленные боковые стороны задней части подгузника наложите сверху и закрепите застёжки на передней части подгузника.